

PROTOCOL medisch-technische handeling**Hb-bepaling (HemoCue®)**

VOORBEREIDING		JA	NEE
1	Sieraden van handen en polsen verwijderen, kapsel en kleding correct	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Handhygiëne correct (wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Benodigde materialen: niet-steriele handschoenen, bloedlancet, depper, pleister, naaldencontainer, HemoCue®, cuvette	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Informeer de patiënt op de juiste manier over de handeling (vraag zonodig toestemming)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
UITVOERING		JA	NEE
5	Laat de patiënt zitten op een stoel met armleuningen of liggen op een onderzoeksbank	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Trek niet-steriele handschoenen aan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Voer de vingerprik volgens protocol uit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Vul de cuvette met bloed	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Veeg zonodig het teveel aan bloed aan de buitenkant van de cuvette af met een gaasje	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	Controleer de cuvette op luchtbellen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	Plaats de cuvette in de houder en schuif deze terug in het apparaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	Lees de uitslag af wanneer deze op het scherm verschijnt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NAZORG		JA	NEE
13	Ruim de materialen op de juiste manier op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	Handhygiëne correct (handschoenen binnenstebuiten verwijderen, wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	Noteer de gegevens in het EMD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALGEMEEN		JA	NEE
16	Werk hygiënisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	Werk methodisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Beoordelingsprotocol bij *Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten* (ISBN 978 90 368 0918 4)