

PROTOCOL medisch-technische handeling



Bezinking

VOORBEREIDING		JA	NEE
1	Sieraden van handen en polsen verwijderen, kapsel en kleding correct	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Handhygiëne correct (wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Benodigde materialen: niet-steriele handschoenen, vacuümsysteem voor afname bloed, stuwband, deppers, pleister, BSE-buizen, BSE-rek, onderlegger, zonodig desinfectans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Informeer de patiënt op de juiste manier over de handeling (vraag zonodig toestemming)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
UITVOERING		JA	NEE
5	Laat de patiënt zitten op een stoel met armleuningen of liggen op een onderzoeksbank	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Trek niet-steriele handschoenen aan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Voer de venapunctie uit volgens protocol	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Plaats de buis rechtop in de houder op een trillingsvrije ondergrond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Zet de timer op 60 minuten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	Noteer het nummer van de plaats van de buis in de houder en zet daarachter de naam van de betreffende patiënt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	Lees na precies een uur de bezinking af en let op eventuele bijzonderheden in kleur en scheiding van de plasmakolom	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NAZORG		JA	NEE
12	Ruim de materialen op de juiste manier op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	Handhygiëne correct (handschoenen binnenstebuiten verwijderen, wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	Noteer de gegevens in het EMD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALGEMEEN		JA	NEE
15	Werk hygiënisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	Werk methodisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Beoordelingsprotocol bij *Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten* (ISBN 978 90 368 0918 4)