

PROTOCOL medisch-technische handeling**Fluoronderzoek**

VOORBEREIDING		JA	NEE
1	Sieraden van handen en polsen verwijderen, kapsel en kleding correct	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Handhygiëne correct (wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Benodigde materialen: niet-steriele handschoenen, KOH 10%-oplossing, fysiologische zoutoplossing, object- en dekglasjes, microscoop, pH-teststrook	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
UITVOERING		JA	NEE
4	Trek niet-steriele handschoenen aan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Bepaal de zuurgraad van de fluor met de pH-teststrook	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Doe op een objectglasje zowel een druppel NaCl 0,9% als een druppel KOH 10%	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Breng een beetje fluor aan in beide druppels	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Voer direct de aminetest uit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Breng dekglasjes aan en bekijk beide preparaten met de microscoop (condensor helemaal naar beneden en diafragma bijna dicht; eerst met 100 x vergroting, daarna met 400 x)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NAZORG		JA	NEE
10	Ruim de materialen op de juiste manier op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	Handhygiëne correct (handschoenen binnenstebuiten verwijderen, wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	Noteer de gegevens in het EMD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALGEMEEN		JA	NEE
13	Werk hygiënisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	Werk methodisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Beoordelingsprotocol bij *Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten* (ISBN 978 90 368 0918 4)