

**PROTOCOL medisch-technische handeling****Urineonderzoek (teststroken)**

<b>VOORBEREIDING</b>		<b>JA</b>	<b>NEE</b>
1	Sieraden van handen en polsen verwijderen, kapsel en kleding correct	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Handhygiëne correct (wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Benodigde materialen: niet-steriele handschoenen, teststroken, tissues, horloge met secondewijzer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>UITVOERING</b>		<b>JA</b>	<b>NEE</b>
4	Trek niet-steriele handschoenen aan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Kantel het gesloten urinepotje enkele keren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Neem een teststrook uit het busje en sluit dit daarna weer af	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Doop de teststrook kort in de urine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Tik de teststrook af	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Lees de teststrook af na verloop van de inwerktijd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>NAZORG</b>		<b>JA</b>	<b>NEE</b>
10	Ruim de materialen op de juiste manier op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	Handhygiëne correct (handschoenen binnenstebuiten verwijderen, wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	Noteer de gegevens in het EMD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>ALGEMEEN</b>		<b>JA</b>	<b>NEE</b>
13	Werk hygiënisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	Werk methodisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Beoordelingsprotocol bij *Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten* (ISBN 978 90 368 0918 4)