

**PROTOCOL medisch-technische handeling****Urinesediment**

<b>VOORBEREIDING</b>		<b>JA</b>	<b>NEE</b>
1	Sieraden van handen en polsen verwijderen, kapsel en kleding correct	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Handhygiëne correct (wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Benodigde materialen: niet-steriele handschoenen, centrifuge, sedimentbuizen, object- en dekglasjes, lenspapier, microscoop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>UITVOERING</b>		<b>JA</b>	<b>NEE</b>
4	Trek niet-steriele handschoenen aan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Kantel het gesloten urinepotje enkele keren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Vul de gemerkte sedimentbuizen tot 1 cm onder de bovenrand en plaats ze in de centrifuge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Noteer van elke sedimentbuis de persoonsgegevens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Centrifugeer gedurende 5 minuten met 2500 toeren per minuut	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Schenk de heldere urine af en tik de buis daarna eenmaal voorzichtig af	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	Schud het sediment op en maak een preparaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	Beoordeel het preparaat onder de microscoop (diafragma bijna dicht; eerst met 100 x vergroting, daarna met 400 x)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	Bekijk vijf gezichtsvelden en noteer van elk veld de bevindingen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>NAZORG</b>		<b>JA</b>	<b>NEE</b>
13	Ruim de materialen op de juiste manier op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	Handhygiëne correct (handschoenen binnenstebuiten verwijderen, wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	Noteer het gemiddelde van de vijf velden als uitslag in het EMD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>ALGEMEEN</b>		<b>JA</b>	<b>NEE</b>
16	Werk hygiënisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	Werk methodisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Beoordelingsprotocol bij *Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten* (ISBN 978 90 368 0918 4)